

Pregledajte sljedeća uputstva prije vađenja folije za zube iz pakovanja.

O FULLALIGN FOLIJAMA

FULLALIGN folije za ispravljanje zuba su providne plastične folije koje su proizvedene posebno za Vas na osnovu otiska ili skeniranja Vaših zuba od strane stomatologa.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

FULLALIGN folije čine niz prozirnih, laganih folija namijenjenih za korekciju dentalnih malokluzija kod pacijenata sa stalnom denticijom (npr. svi drugi kutnjaci). FULLALIGN folije su namijenjene za pozicioniranje zuba kontinuiranim blagim silama.

KONTRAINDIKACIJE

Ne preporučuje se upotreba u slučaju **alergije na plastiku**.

OPŠTA UPUTSTVA

- Svaka folija treba da se nosi minimum **15 dana ili prema uputstvu stomatologa**.
- Svaka folija se mora nositi tokom noći i dana, osim za vrijeme jela ili pranja zuba.
- U slučaju gubitka, oštećenja ili loma folija, **javite se odmah Vašem stomatologu**.

POSTAVLJANJE FOLIJA

- Provjerite imate li odgovarajuću foliju za ispravljanje zuba - gornju foliju za gornje zube i donju za Vaše donje zube. (slika 1.)
- Možete postaviti bilo koju foliju prvo. Kad postavljate foliju, nježno gurnite foliju preko prednjih zuba. (slika 2.)
- Izvršite jednak pritisak prstima na vrhove desnih i lijevih kutnjaka (zadnji zubi) dok se folija ne postavi na svoje mjesto.
- **Provjerite jesu li folije čvrsto postavljene.** Ukoliko se folije ne uklapaju kako treba, nježno zagrizite set za nalijeganje kako bi se pravilno postavile. (slika 3.)
- Ako osjetite značajnu nelagodu, molimo da odmah stupite u kontakt sa Vašim stomatologom.
- Folije čvrsto prijanjaju, pa biste mogli osjetiti pritisak koji je neophodan kako bi se Vaši zubi poravnali.
- Nakon postavljanja moguće je da ćete suškati dok pričate, što će prestati za nekoliko dana kad se Vaš jezik prilagodi folijama.

- Folije se moraju nositi tokom cijelog dana i noći, najmanje 22 časa dnevno, osim za vrijeme jela, pranja i čišćenja zuba koncem ili prema preporuci Vašeg stomatologa.



SKIDANJE FOLIJA

- Koristeći prste ili set za skidanje, počnite od kutnjaka na jednoj strani i polako pređite na drugu stranu. (slika 4.)
- Kako biste spriječili oštećenje, **izbjegavajte nepotrebno skidanje folije**.
- **NE KORISTITE** nikakve oštre predmete da biste uklonili folije.
- Odmah isperite foliju vodom, otresite višak vode i odložite ih u zaštitnu kutiju koju ste dobili s Vašim početnim kompletom.
- **NEMOJTE** koristiti pretjeranu silu za savijanje ili uvrtanje folija tokom njihovog skidanja.

DNEVNA NJEGA I ODRŽAVANJE

- Nakon svakog čišćenja **temeljno isperite svaku foliju vodom**.
- Očistite folije pomoću četkice za zube s mekim vlaknima koristeći vodu i malu količinu paste za zube. (slika 5.)
- Izbjegavajte korištenje vodice za ispiranje usta za čišćenje folija.
- Uvijek čuvajte svoje folije u zaštitnoj kutiji kada ih ne koristite (slika 6.)
- Prije odlaganja folija u zaštitnu kutiju **uvijek ih očistite i osušite**.





POVEŽI SE SA NAMA!
LIKE, FOLLOW & SHARE



FullAlign



fullalign



+387 66 589 189